


CytoScore

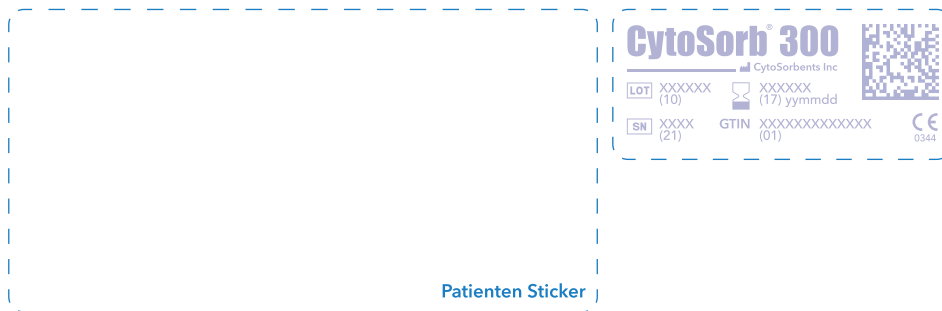

Der Score kann sechs Stunden nach der Diagnose des septischen Schocks/dem Beginn der Standardtherapie erhoben werden, um den klinischen Schweregrad zu bestimmen und die Entscheidungsfindung im Hinblick auf die Einleitung der CytoSorb-Therapie zu unterstützen.

	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	Score (nach 6 Stunden)
Laktat mmol/l	< 2.0		≥ 2.0	
Laktat Veränderung / 6 Stunden	↓ Abnahme	↑ ≤ 50%	↑ > 50%	
NA* µg/kg/min (MAP** ≥ 65)	< 0.1		≥ 0.1	
NA* Veränderung / 6 Stunden	↓ Abnahme	↑ ≤ 50%	↑ > 50%	
Zweites Katecholamin / Zweiter Vasopressor	Nein	Ja		
Hydrokortison verabreicht	Nein	Ja		
Volumen Bolus 30 ml/kgKG***	Nein	< 2 Boli	≥ 2 Boli	
			Summe	

* Noradrenalin
 ** Mittlerer arterieller Blutdruck
 *** Kilogramm Körpergewicht

CytoSorb Behandlung

JA

NEIN

Uhrzeit:

Datum:

Unterschrift:

Hinweis:

Die endgültige prospektive Validierung des Scores steht noch aus, jedoch wurden bei einer ersten retrospektiven Evaluierung des Scores Outcome-Vorteile beobachtet, wenn folgende Kriterien erfüllt waren:

- Indikation für CRRT-Therapie aufgrund von akutem Nierenversagen (ANV)
- CytoScore nach Stunde 6 beträgt > 6 Punkte
- Einleitung der CytoSorb-Therapie < 12 Stunden nach der Diagnose des septischen Schocks / dem Beginn der Standardtherapie

Referenz: Kogelmann K et al., J Clin Med 2021; 10: 2939



CytoSorbents Europe GmbH

Müggelseedamm 131
12587 Berlin | Deutschland

T +49 30 65 49 91 45
F +49 30 65 49 91 46
support@cytosorbents.com

CytoSorbents Switzerland GmbH

c/o MGM GmbH
Wielandstrasse 5 | 4153 Reinach BL | Schweiz

T +41 61 713 73 78
F +41 61 713 73 79
support@cytosorbents.com

Folgen Sie uns auf: [Twitter](#) [LinkedIn](#) [Facebook](#) [YouTube](#) | www.cytosorb.com

Die zu CytoSorb erhobenen klinischen und präklinischen Daten und Ergebnisse sind nicht auf andere Produkte übertragbar. CytoSorb sollte nur von Personal eingesetzt werden, welches ordnungsgemäß im Bereich der Anwendung von extrakorporalen Therapien geschult ist. CytoSorb ist in den USA nicht kommerziell erhältlich. CytoSorb und CytoSorbents sind Marken der CytoSorbents Corporation, USA. © Copyright 2021, CytoSorbents Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten. B1095R04GER2021