



Tratamiento con CytoSorb

Ayuda en la toma de decisiones en
pacientes cardioquirúrgicos

- Aplicación postoperatoria
- Aplicación intraoperatoria

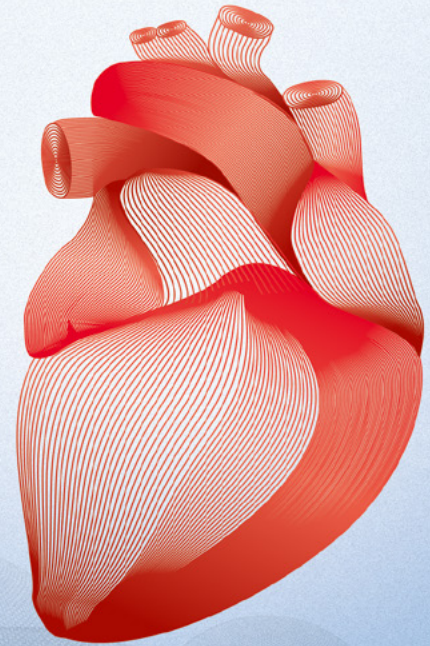


Inicio del tratamiento postoperatorio

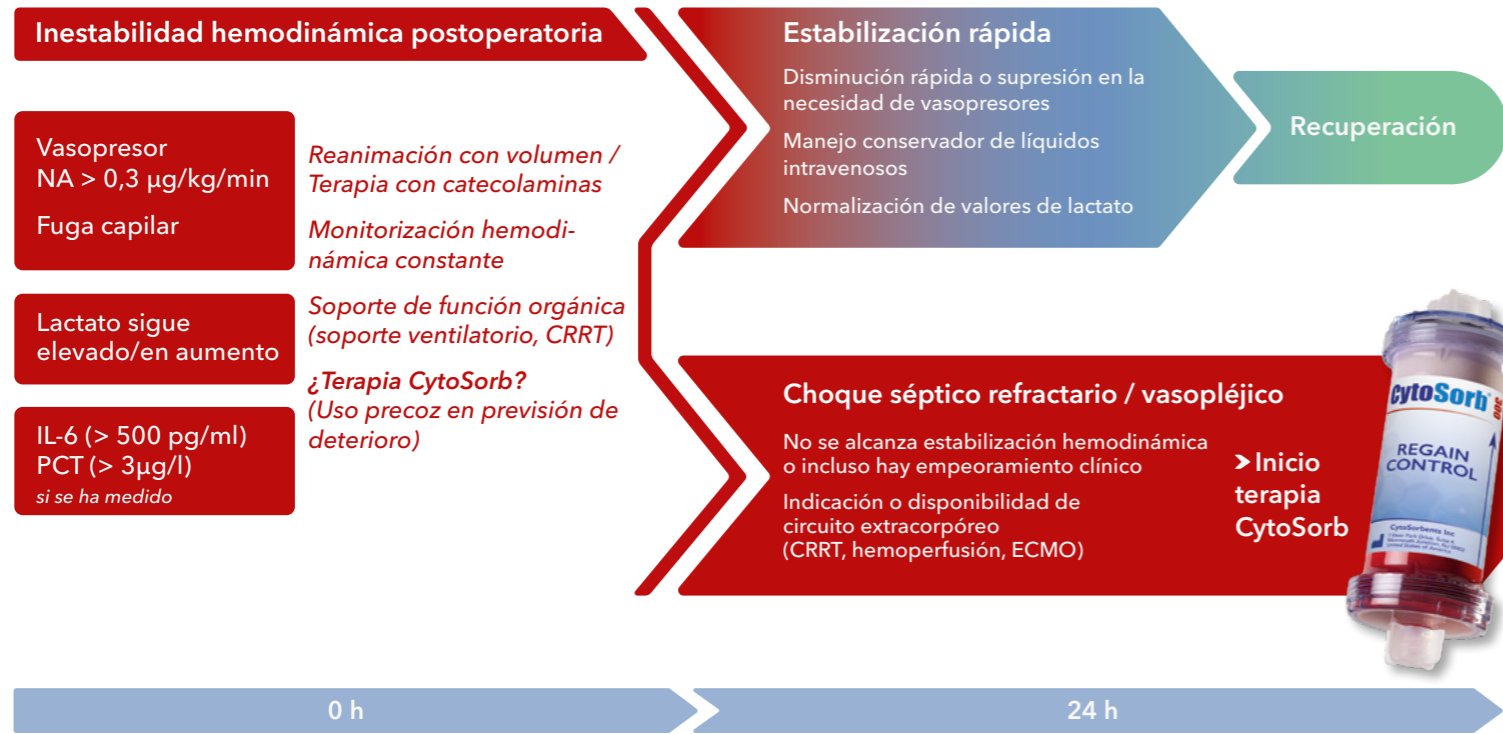

➤ **Uso de CytoSorb en un plazo de 24 h para obtener mejores resultados**

Continuación del tratamiento postoperatorio

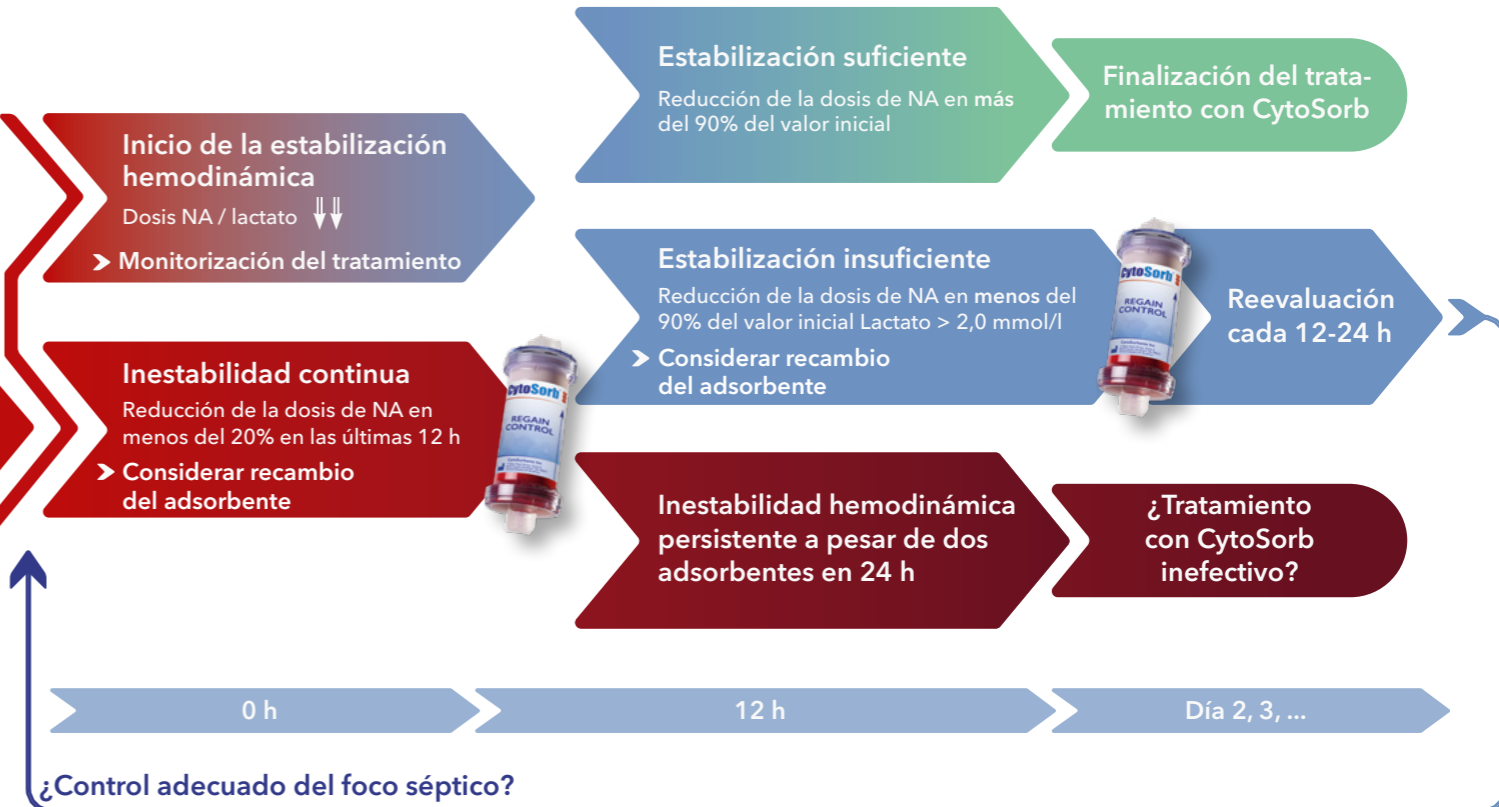







El gráfico se basa en experiencias y datos clínicos recopilados con CytoSorb 300 y por ello no se puede transferir a otras técnicas de purificación de la sangre.


➤ Iniciación intraoperatoria

El uso intraoperatorio del tratamiento con CytoSorb debería considerarse cuando se presentan uno o varios de los siguientes aspectos:

Objetivo: reducción de la respuesta inflamatoria

- Intervenciones complejas con tiempo esperado de CPB prolongado (>120 min) 
 - Procedimiento combinado
 - Procedimiento de repetición
- Endocarditis infecciosa aguda con reemplazo quirúrgico de válvula 
- Cirugía de trasplante de corazón 
- Cirugía aórtica 
- Alta comorbilidad de pacientes y/o disfunción hepática/renal severa preexistente 
- Riesgo elevado de complicaciones intraoperatorias y postoperatorias condicionadas por hiperinflamación 

Objetivo: Reducir el riesgo de hemorragia

- Cirugía cardíaca urgente o de emergencia en pacientes sometidos a tratamiento con ticagrelor o rivaroxaban 

CytoSorbents Europe GmbH

Müggelseedamm 131
12587 Berlín | Alemania

T +49 30 65 49 91 45
F +49 30 65 49 91 46
support@cytosorbents.com

Síguenos en

Esta guía de decisión tiene carácter no vinculante y no puede reemplazar la decisión terapéutica individual del médico a cargo. El médico a cargo es el responsable de determinar y ejecutar medidas de diagnóstico y tratamiento para cada paciente individualmente.

Los datos y resultados clínicos y preclínicos adquiridos con la columna de adsorción Cytosorb no son transferibles a otros productos. CytoSorb sólo debe ser utilizado por personal debidamente formado en el uso de tratamientos extracorpóreos.

CytoSorb no está disponible comercialmente en Estados Unidos. CytoSorb y CytoSorbents son marcas de CytoSorbents Corporation, EE. UU. © Copyright 2020, CytoSorbents Europe GmbH. Reservados todos los derechos. B1082R03SPA2020