

CytoSorb® Best Practice



Flowchart Antithrombotika-Entfernung



Patientenauswahl

Patienten, die sich einem herzchirurgischen Eingriff unterziehen und mit Ticagrelor und/oder Rivaroxaban vorbehandelt wurden, mit letzter Dosis von:

- Ticagrelor < 72 Std.
- Rivaroxaban < 48 Std.



Timing

Beginnen Sie die Therapie mit dem Beginn der HLM.

CytoSorb® lässt sich leicht in den HLM-Kreislauf integrieren ("post-pump" - nach der arteriellen Pumpe zum Reservoir)



Dosierung

Eine postoperative Fortsetzung (mit einem neuen in den extrakorporalen Kreislauf integrierten Adsorber) ist normalerweise NICHT erforderlich, wenn die HLM-Zeit > 60 Minuten beträgt, kann aber bei Bedarf durchgeführt werden.



* CytoSorb® Integration in HLM



Ausführliche
Informationen unter
cyto.zone/setup

** HLM Zeiten sollten idealerweise > 60 Minuten sein, um genügend Zeit
für eine ausreichende Substanzentfernung durch CytoSorb® zu bieten

Folgen Sie uns auf: | www.cytosorb.com